

## Exofin (Chemence) kudosliimat käyttöohje

Exofin (1,0ml) ja Exofin Micro (0,5ml) ovat nestemäisiä kudosliimoja. Vaikuttava aine on oktyyli-2-syanoakrylaatti, joka takaa nopean kuivumisen ja vahvan kiinnipysymisen. Tämä kudosliima on myös joustava, joten se ei murru niin helposti kuin tavalliset kudosliimat. Exofin liimat ovat vedenpitäviä, joten potilas voi käydä suihkussa tarvittaessa. Liimattua aluetta ei saa kuitenkaan hangata ja sen voimakasta suihkuttamista kannattaa välttää.

Haavan tulee olla puhdas ja kuiva ennen iholiiman levittämistä. Haavan reunat tulee olla helposti yhdistettävissä. Exofin kudosliimoja tulee käyttää ainoastaan pinnallisten ihohaavojen liimaamiseen. Exofin kudosliimat kuivuu noin 30 sekunnissa. Työskentelyaikaa on 2-3 minuuttia. Liiman väri on vaalean violetti.



Kierrä kudosliiman säiliöosaa myötöpäivään niin, että se yhdistyy tiukasti kärkiosaansa. Näin sisällä oleva foliokalvo rikkoontuu ja kudosliima pääsee virtaamaan vapaasti.



Pidä liimaputkiloa vaakasuorassa ja purista kevyesti putkiloa kunnes liima leviää läpinäkyvään kärkiosaansa.



Paina haavan reunoja yhteen ja purista liimaputkiloa kevyesti. Levitä liimaa tasaisesti haavan päälle edestakaisella liikkeellä. Pidä haavanreunat yhdessä kunnes liima muuttuu tahmeaksi. Tämä kestää noin 20 sekuntia. Tavoitteena on tasainen ja sileä pinta.



Kun kudosliima on täysin kuivunut, voit peittää haavan halutessasi siteellä. Varmistu tällöin, että pinta on täysin kuivunut, muuten side voi tarttua liimaan kiinni.

