

## Derma+Flex QS (Chemence) kudosliiman käyttöohje

Derma+Flex QS (0,7ml) on nestemäinen kudosliima. Vaikuttava aine on oktyyli-2-syanoakrylaatti, joka takaa nopean kuivumisen ja vahvan kiinnipysymisen. Tämä kudosliima on myös joustava, joten se ei murru niin helposti kuin tavalliset kudosliimat. Derma+Flex QS kudosliima on vedenpitävä, joten potilas voi käydä suihkussa tarvittaessa. Liimattua aluetta ei saa kuitenkaan hangata tai raapia ja sen voimakasta suihkuttamista kannattaa välttää.

Haavan tulee olla puhdas ja kuiva ennen iholiiman levittämistä. Haavan reunat tulee olla helposti yhdistettävissä. Derma+Flex QS kudosliimaa tulee käyttää ainoastaan pinnallisten ihoaavojen liimaamiseen. Derma+flex QS kuivuu 60-90 sekunnissa ja työskentelyaika on noin 90 minuuttia.



Kierrä kudosliiman säiliöosaa myötäpäivään niin, että se yhdistyy tiukasti kärkiosaan. Näin sisällä oleva foliokalvo rikkoontuu ja kudosliima pääsee virtaamaan vapaasti. Violetti tippa ilmestyy putkilon putkilon päähän.



Pidä liimaputkiloa pystyssä ja purista kevyesti putkiloa tyvestä, kunnes kärki on näkyvästi violetti. Tämän jälkeen tuote on käyttövalmis



Paina haavan reunoja yhteen ja levitä liimaa tasaisesti. Voit käyttää kärjen kapeaa kulmaa tai tasaista päätä liiman levittämiseen. Levitä liimaa haavan päälle edestakaisella liikkeellä. Jos liima loppuu ja kärki muuttuu valkoiseksi, voit lisätä liimaa kuvassa 2 olevalla tavalla kärkeen. Tavoitteena on tasainen ja sileä pinta.

Pidä haavanreunat yhdessä kunnes liima on täysin kuivunut. Pintaei ole tahmea kun koskettaa. Tämä kestää noin yhden minuutin. Kudosliiman kuivuttua täysin voit halutessasi peittää haavan siteellä.

Derma+flex QS on koostumukseltaan siirappimainen, jonka ansiosta se ei valu haavan ympärille. Derma+flex QS luo haavan pinnalle mikrobiesteen, joka suojelee haavaa ulkoisilta infektiolta. Tuote häviää itsestään ihon pinnalta 5-10 päivän aikana. Derma+flex QS:n exoderminen reaktio on vain 0,5°C joten se sopii hyvin myös palovammoille.

