

Entellus lopprofile, käyttöohjeet




Entellus pallolaajentimen Indikaatiot




Indikaatiot


Otsaontelokanavan, kitaontelon ostiumin ja poskiontelon ostiumin pallolaajennukseen

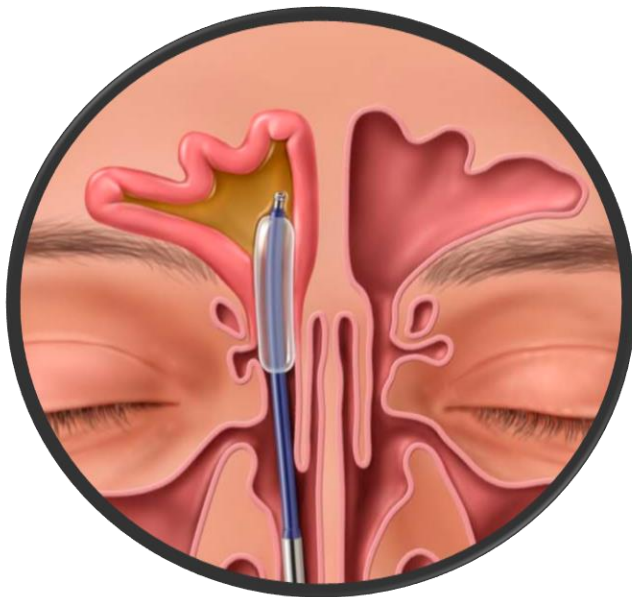

Otsaontelo

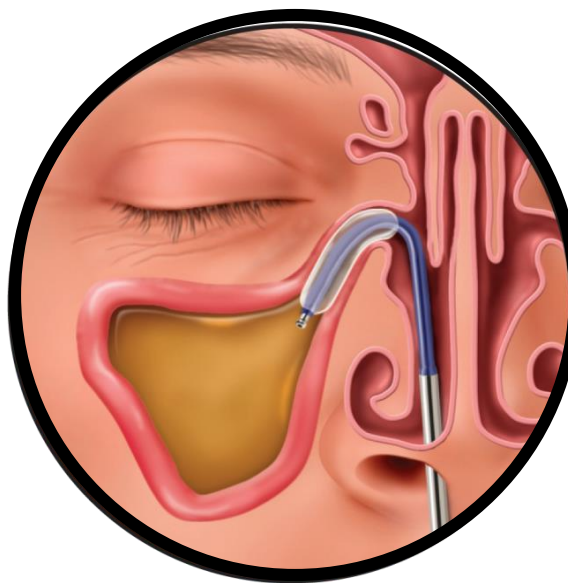


Poskiontelo

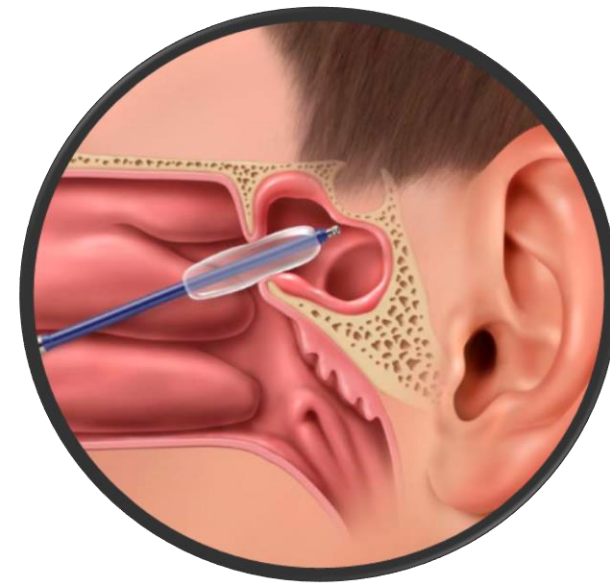

Kitaontelo


Jokaisessa pakkauksessa suomenkieliset käyttöohjeet, lista kontraindikaatioista, varoitukset ja varotoimet.

Entellus LoProfile

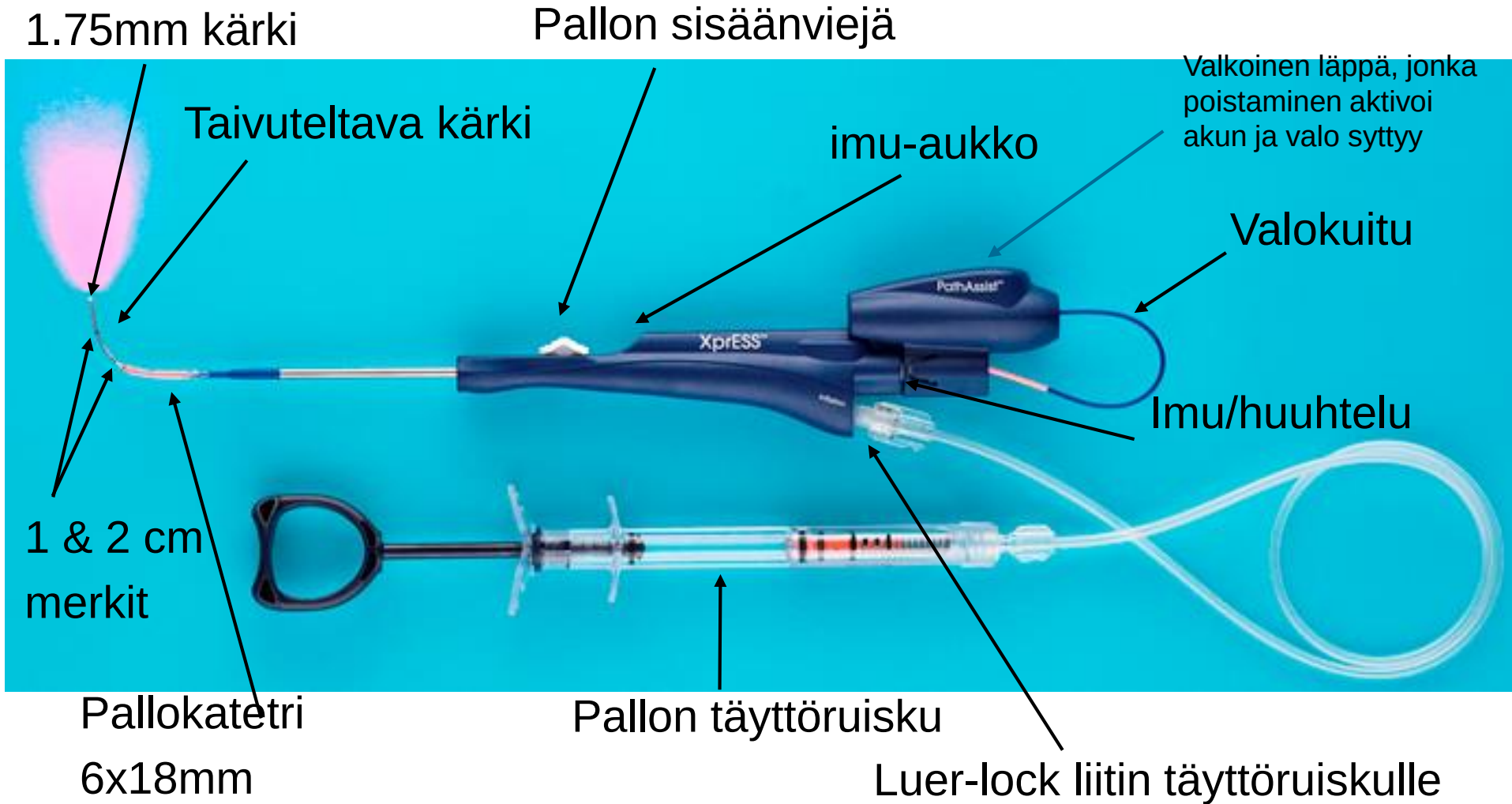


Yhdellä instrumentilla kaikki sivuontelot


- XprESS instrumenttipakkaus sisältää kaiken tarvittavan sivuonteloiden pallolaajentamiseen

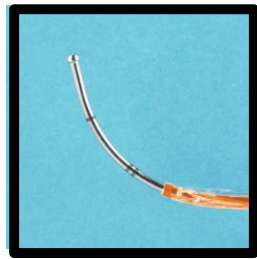

**78° Frontaali
kulma**

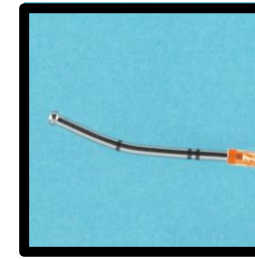

**19° Kitaontelo
kulma**

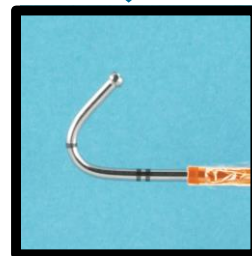

**135° Poskiontelo
kulma**

Taivuteltavan kärjen avulla saavutat myös poikkevan anatomian


XprESS instrumentin valmistelu



Tyhjennä ruisku ilmasta viemällä mäntä sisään, vie ruiskun pää vesikulhoon



Täytä ruisku hitaasti kunnes kuulet toisen klikkauksen ja ruiskun mäntä on ääriasennossa.

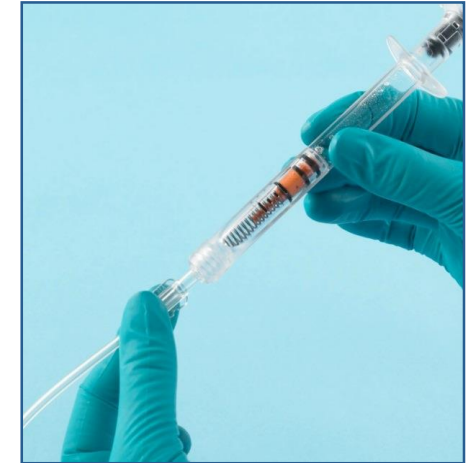

Liitä jatkoletku ruiskuun




Mäntä sisällä



Mäntä ääriasennossa, kaksi klikkausta kuulunut

XprESS instrumentin valmistelu

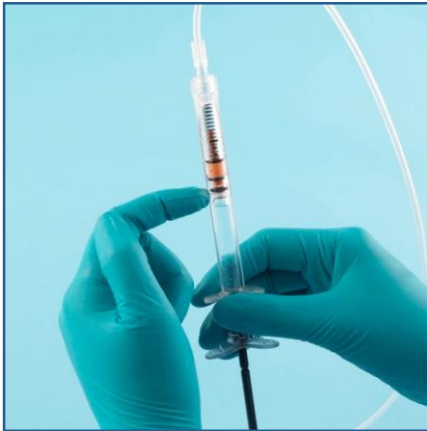

1) Pidä ruiskun kärkeä ylöspäin ja työnnä ilma pois letkustosta



2) Työnnä kaikki ilma ja neste pois ruiskusta ja letkustosta.



3) Täytä letkusto ja ruisku nesteellä niin pitkälle, että kuulet ensimmäisen klikkauksen ruiskusta (pidä letkuston pää veden pinnan alla).



4) Kiinnitä letkusto pallolaajentimen luer-lock liittimeen

XprESS Instrumentin valmistelu

Huomaa ruiskun 3 eri asentoa

Kun mäntä työnnetään pohjaan, saavutetaan 12 barin paine palloon



Männän sisällä on oranssi linja, jossa on musta pystyviiva, tämä saavuttaa laajentamisen yhteydessä ruiskun ulkopuolella olevan vastaavan merkin.

Testaa pallon eheys ennen toimenpidettä työntämällä mäntä pohjaan. Pallokatetrin päällä on suoja, joka sallii pallon laajentua. Jos pallo laajenee, eikä vuotoja esiinny, kaikki on kunnossa. Vedä mäntä kokonaan taakse, poista pallon suojan ja aloita toimenpide.



Mäntä täysin sisällä




Ensimmäinen klikkaus




Toinen klikkaus kuulunut, mäntä täysin ulkona

● Kärjen taivutus

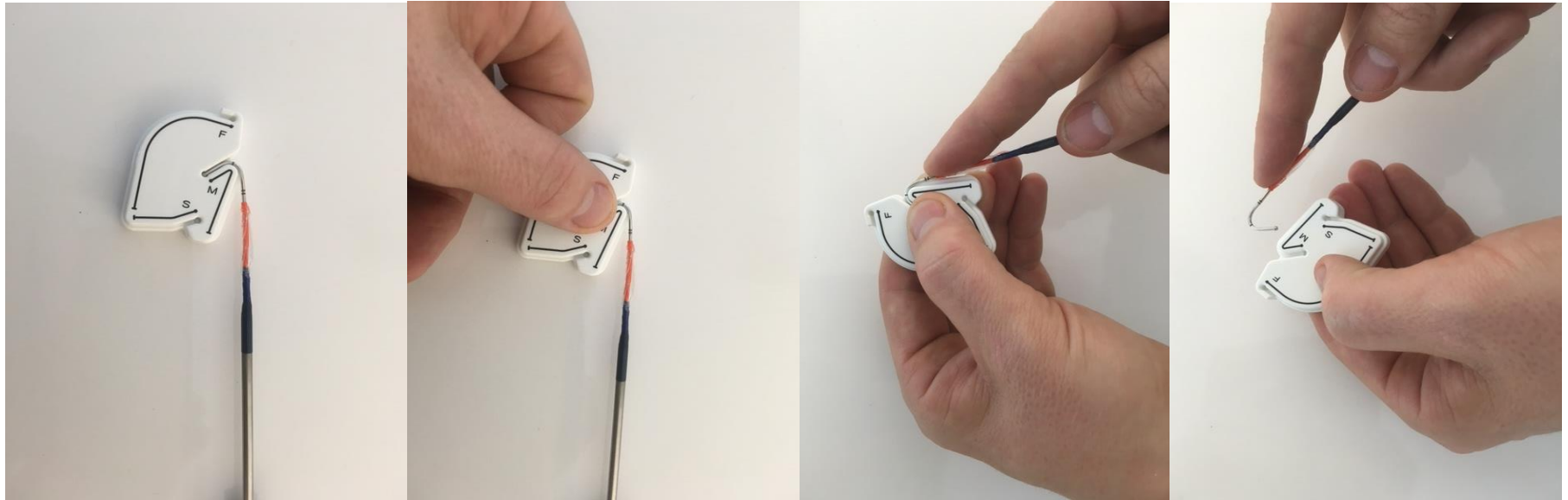

Pallolaajentimen kärkeä taivutetaan mukana olevan taivuttimen avulla, vie laajentimen kärki paikoilleen, tue peukalolla kärkeä ja taivuta toisella kädellä laajennin haluttuun muotoon.

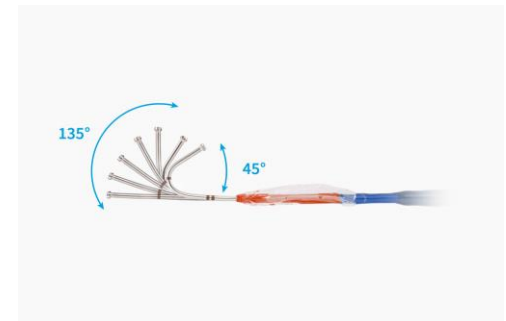


Huuhtelu



Huuhtelua varten irroita akku ja vedä myös valokuitu ulos. Akku voi olla joskus hieman jumissa, jolloin kannattaa hakea uusi kulma ja yrittää uudelleen.

Akun irrottua, liitä paketissa oleva jatkoletku valkoiseen luer-päähän ja jatkoletkun toiseen päähän luer-lock kannalla oleva keittosuola-ruisku 20/50ml.

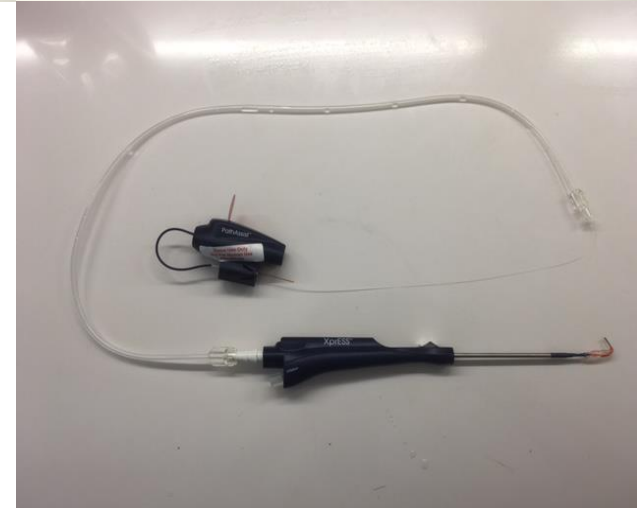

Lyhyesti

- 1) Täytä ruisku ja jatkoletku vedellä, poista ainakin suurimmat ilmakuplat. Vedä ruiskuun nestettä niin pitkälle että kuulet 1. klikkauksen.
- 2) Kytke letkusto pallolaajentimen luer-lock päähän
- 3) Testaa pallo työntämällä sinne nestettä, jos pallo laajenee, kaikki on kunnossa, vedä mäntä kokonaan taakse (2 klikkausta) ja poista pallon suoja.
- 4) Poista akun päällä oleva valkoinen läppä ja valo syttyy, Akun kesto on noin 3 tuntia.
- 5) Kun lääkäri antaa luvan laajentaa, täytä pallo rauhallisesti työntämällä ruiskun mäntä pohjaan, laske hitaasti kolmeen ja tyhjennä pallo.
- 6) Lopuksi voit huuhdella sivuontelot. Irroita pallolaajentimen akku ja vedä valokuitu pois laajentimesta. Kytke jatkoletku ja keittosuolalla täytetty luer-lock kantainen ruisku jatkoletkun toiseen päähän. Taivuta instrumentin päätä tarvittaessa, jotta saavutat haluamasi sivuontelot.