

NexStat ENT paikallinen hemostaatti jauhe on luonnonmukainen, kasvipohjainen polysakkaridi, joka toimitetaan käyttövalmiina haitarisäiliöllisessä pullossa, joka mahdollistaa helpon käytön esim. sinuskirurgian yhteydessä. Taipuisan, pitkän kärjen ansiosta hemostaatti on helppo suunnata hankalastikin tavoitettavaan paikkaan. emostaattijauhe on tarkoitettu kirurgisten haavojen, repeämien ja lievien verenvuotojen tyrehtyttämiseen esim. KNK-kirurgiassa. Sitä voidaan käyttää myös percutaanisten neulojen ja katetrien aiheuttamien vuotojen tyrehtyttämiseen. Tuote sulaa pois noin viikossa. Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei sovellu potilaille, joilla on allergia perunatärkkelykselle.



Veren hyytyminen saavutetaan poistamalla vesi vuotoalueelta ja tämän jälkeen hemokonsentraatio kontaktilla NexStat hemostaatin kanssa. Hyytymistekijöiden kasvu vuotoalueella edistää endogeenistä hemokonsentraatiota.

Käyttöohjeet:

- 1) Poista säiliöstä korkki, kiinnitä tilalle taipuisa, pitkä kärki (3kpl paketissa)
- 2) Ime vuotoalueelta veri pois, jotta näet vuotokohdan kunnolla
- 3) Ruiskuta vuotokohtaan riittävä määrä Nexstat -pulveria. Jos kärki menee tukkoon, kosketettuaan verta, vaihda tilalle uusi kärki
- 4) Paina vuotokohtaa hetken ajan kuivalla taitoksella tai esim. aivopumpullia, tarkista onko vuoto tyrehtynyt.
- 5) Poista taitos kastelemalla se ensin vedellä ja sen jälkeen poistamalla varovaisesti
- 6) Jos vuoto jatkuu, toista edellä mainitut toimenpiteet

Nexstat, hemostaattijauhe 3g, 5kpl/pkt