



Rapid Rhino Epistaxis



1. Liota steriilissä vedessä noin 60 sekuntia.

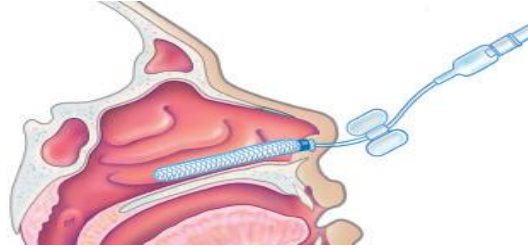

2. Aseta Rapid Rhino paikalleen siniseen merkkiin asti.

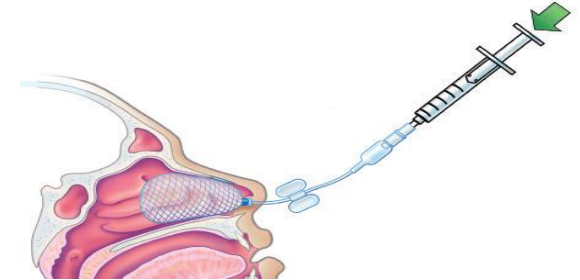


3. Täytä ilmakammio työntämällä ilmaa 20 ml ruiskulla.

Tarkkaile potilasta ja tunnustele ilmakammion painetta ulkopuolella olevasta ilmatyynystä.



4. Tarkista paine 15 – 20 minuutin kuluttua.

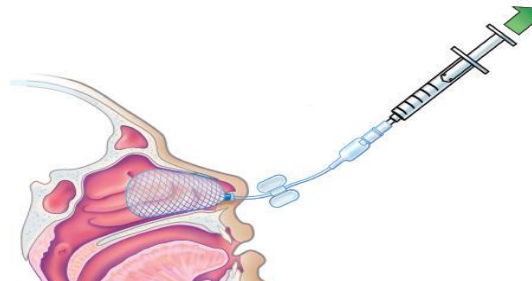

5. Tyhjennä ilmakammio ja poista Rapid Rhino 24 - 72 tunnin kuluttua.


Ilmakammion max. täyttö:

RR 550: 30ml

RR 750: 40ml

RR 900 posterior: 10 -15ml,
anterior: 25-30ml

Rapid Rhino Epistaxis

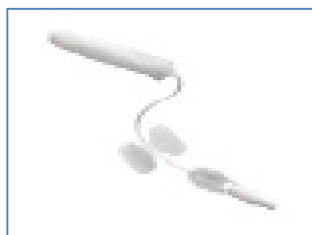


Rapid Rhino 450



Rapid Rhino 550



Rapid Rhino 750

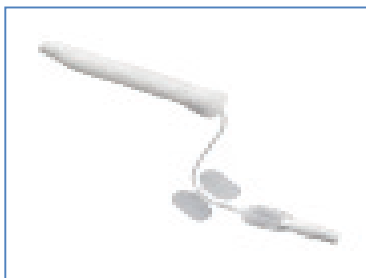

Rapid Rhino 551
- sisältää ilmatien



Rapid Rhino 751
- sisältää ilmatien



Rapid Rhino 900
- 2 ilmakammiota,
etu ja takakammiot