

Tristel Trio™

Desinfektioliinat

Täydellinen menetelmä korkealuokkaiseen desinfektioon ei-kanavaisille sairaalatarvikkeille.

Tristel Trion käyttö taipuisten ja jäykkien endoskooppien desinfektioon.

ESIPESU



Poista esipesuliina (Pre-Clean) paketistaan ja levitä se kämmenellesi. Esipesu tulee suorittaa heti laitteen käytön jälkeen noudattaen sairaalan protokollaa.



Pyyhi endoskooppi kokonaan aloittaen kahvapäästä. Älä hankaa tai taivuta endoskooppia ja kiinnitä erityistä huomiota reunoihin ja syvennyksiin.

Laske endoskooppi takaisin alkuperäiselle alustalle, laita käytetty liina ja käsinet roskakoriin. Desinfioi kätesi ja laita uudet tehdaspuhtaat hansikkaat.

KORKEALUOKKAINEN DESINFECTIO



Poista desinfektioliina (Sporidial Wipe) pakkauksesta ja levitä se kämmenellesi.



Ota aktivaattoripullo toiseen käteesi ja paina 2 kertaa vaahtoa liinan päälle. Jos käytät 50ml aktivaattoripulloa, lisää neljä suihkausta vaahtoa.

KORKEALUOKKAINEN DESINFECTIO



Taittele liina vaahton päälle ja puristele liinaa noin 15 sekunnin ajan. Varmista että ainetta on päässyt joka puolelle liinaa.



Pyyhi endoskooppi kokonaan aloittaen kahvapäästä. Varmista, että kaikki alueet pääsevät kontaktiin vaahton kanssa.

Laske endoskooppi puhtaalle liinan päälle. Laita käytetty liina roska-astiaan.



Anna aineen vaikuttaa vähintään 30 sekuntia.

HUUHTELU



Poista huuhteliina (Rinsing wipe) pakkauksesta ja levitä se kämmenellesi.



Pyyhi endoskooppi kokonaan aloittaen kahvapäästä. Tarkoituksena on poistaa jäljelle jäänyt desinfektiovahto. Laske endoskooppi takaisin puhtaalle liinalle. Laita käytetty liina roska-astiaan.

JÄLJITETTÄVYYS JA KULJETUS



Täytä mukana tulevaan seurantakirjaan tarvittavat tiedot. Tuotetiedot saat kätevästi desinfektiopakkausessa olevasta tarrasta. Lisäinformaatiota löydät mukana tulevasta oppaasta.



Endoskooppi on nyt valmis uuteen käyttöön tai asianmukaiseen säilytykseen. Lyhytaikaiseen säilytykseen ja kuljetukseen, Tristel suosittelee Tristel Protect suojauspeijä.

Huomautukset:

- Desinfioi kätesi ja käytä asianmukaisia käsinetejä kun käsittelet endoskooppeja ja desinfektioaineita.
- Älä hävitä liinapakkauksia ennen kuin olet tallentanut tuotetiedot seurantakirjaan.
- Alusta, jolla huolto suoritetaan tulee jakaa likaiseen ja puhtaaseen.
- Valmistele huolto ottamalla jokaista liinaa 1 kpl ja aktivaattoripullo valmiiksi esille.
- Hävitä liinat ja pakkaukset sairaalan sääntöjen mukaan.
- Noudata aina sairaalan sääntöjä ja endoskooppien valmistajien suosituksia.
- Älä käytä tuotetta jos pakkaus on vahingoittunut tai liinat ovat kuivia.
- Käytä tarvittaessa useampia liinoja varmistuaksesi, että instrumentti on selvästi puhdas.
- Tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Tristel

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 • E mail@tristel.com • W www.tristel.com

For Tristel patent information please visit: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-143-1
January 2017