

## STAGE-ONE KÄYTTÖOHJE

Maailman johtavien gastroenterologisten organisaatioiden suositus on tehdä endoskoopeille esipesu välittömästi toimenpiteen jälkeen. Tuotteen avulla huuhtelet endoskoopin kanavan sisältä ja mukana tulevan pesusienen avulla myös endoskoopin pinta tulee puhdistettua. Stage-onen mukana tulee biologisesti hajoava huuhteluastia, pesuaine ja pesusieni.

Lisää 500ml vettä ja lisää pesuaine. Pyyhi endoskooppi pesusienellä ja ime pesuaine skoopin läpi.

Tuote noudattaa kansainvälisiä suosituksia mm. World Gastroenterology Organisation, European Society of Gastroenterology, British Society of Gastroenterology.


Ref. **INOV8-009**, 100 kpl/ltk



1. Lisää hieman vettä huuhteluastiaan



2. Kaada pesuaine huuhteluastiaan

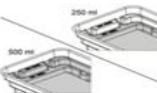

3. Lisää vettä huuhteluastiaan aina 500ml asti



4. Purista pesusientä muutaman kerran liuoksessa ja pyyhi tähystin huolellisesti



5. Ime imu- ja työskentelykanava pulsoivalla imulla ( vuoroin vettä, vuoroin ilmaa) kunnes vesi on huuhteluastiasta loppu



6. Hävitä huuhteluastia asianmukaisesti käytön jälkeen

