



1 Tee endoskoopille vuototestaus ennen kuin upotat pesuaineliuokseen

2 2.8 > **PULL THRU** > 5.0 mm id

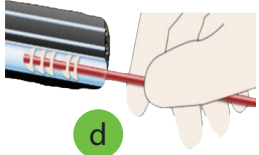


Tarkoitettu 2,8-5,0mm työskentelykanaville. Tarkista Pull Thru -tuotteen yhteensopivuus ennen käyttöä endoskoopin distaalipäässä. Jos tuote on liian tiukka tai liian pieni, tarkista toimenpidekanavan halkaisija uudesta endoskoopin valmistajan manuaaleista.

3 **2.8-5.0**™  
**PULL THRU**™  
ENDOSCOPES

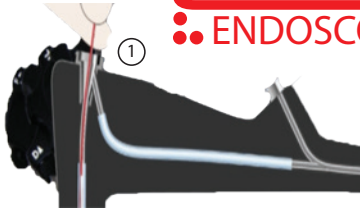


a → b

Ensimmäisenä huolla endoskoopin imukanava imuportista valonlähteen suuntaan tai toisinpäin a -> b . Jos pyyhinkiekoissa 4 ja 5 on vielä likaa, toista käsittely.

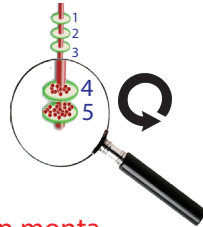


Käytä Pull Thru tuotetta niin monta kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat puhtaita ulostullessaan.

4 **2.8-5.0**™  
**PULL THRU**™  
ENDOSCOPES

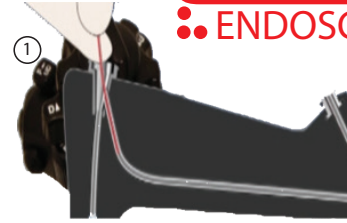


Olympus® a → d  
Fujifilm® b  
Pentax®

Tämän jälkeen huolla kanava Imuportista endoskoopin päähän, a -> d tai b -> d, toista käsittely tarvittaessa, jos pyyhinkiekoissa 4 ja 5 on vielä likaa.

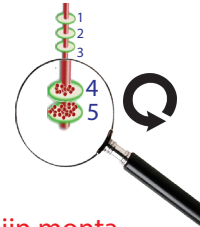


Käytä Pull Thru tuotetta niin monta kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat puhtaita ulostullessaan.

5 **2.8-5.0**™  
**PULL THRU**™  
ENDOSCOPES

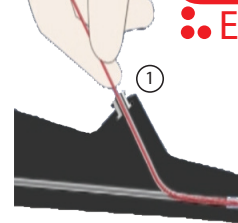

c → d

Viimeisenä huolla kanava biopsiapor- tista endoskoopin päähän c -> d, toista käsittely tarvittaessa, jos pyyhinkiekoissa 4 ja 5 on vielä likaa.

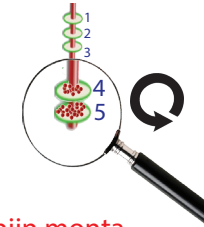

Käytä Pull Thru tuotetta niin monta kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat puhtaita ulostullessaan.



Hävitä Pull Thru tuote asianmu- kaisesti



**OTOPLUG OY**

Osuusmyllynkatu 7  
33700 Tampere  
Finland  
tel. 03 364 7215  
FORM 55014

