

EMST laitteiden puhdistus

1. Suosittelemme puhdistamaan EMST 75/150 harjoituslaitteen kuukausittain.
2. Poista suukappale ennen puhdistusta. Pese suukappale saippualla ja vedellä. Ilmakuivaa tämän jälkeen.
3. Täytä sopiva puhdas astia lämpimällä vedellä ja lisää tippa astianpesuainetta.
4. Upota ja ravistele EMST laitetta lämpimässä vedessä noin 20-30 sekuntia.
5. Nosta laite vedestä ja ravista hyvin, jotta vesi poistuu laitteesta.
6. Huuhtele juoksevalla vedellä, kunnes läpituleva vesi on kirkasta. Ravista tämän jälkeen vesi pois laitteesta.
7. Anna kuivua ilmassa paikassa yön yli



Älä käytä valkaisuainetta
Älä anna muiden käyttää EMST laitettasi