

Lampun vaihto Karl Kaps korvamikroskooppiin

Aina ennen lampunvaihtoa ota virtajohto pois seinästä!

HUOM! Odota, että polttin on jäähtynyt jos laite ollut käytössä hiljattain.


”Lämminvalo” polttimen vaihto:

**Polttimon tyyppi: 12V/100W G6.35 esim. HLX64625 Otoplug
tuotenumero**

1. Paina sinisellä ympyröityä metalliliuskaa jolloin valoyksikön suojan saa käännettyä ylöspäin.



2. Vedä poltinta ylöspäin jolloin poltin irtoaa. Asenna uusi poltin työntämällä uusi poltin lampun kannan pistokkeeseen takaisin. Käytä paperia/ liinaa käsitellessä uutta poltinta.

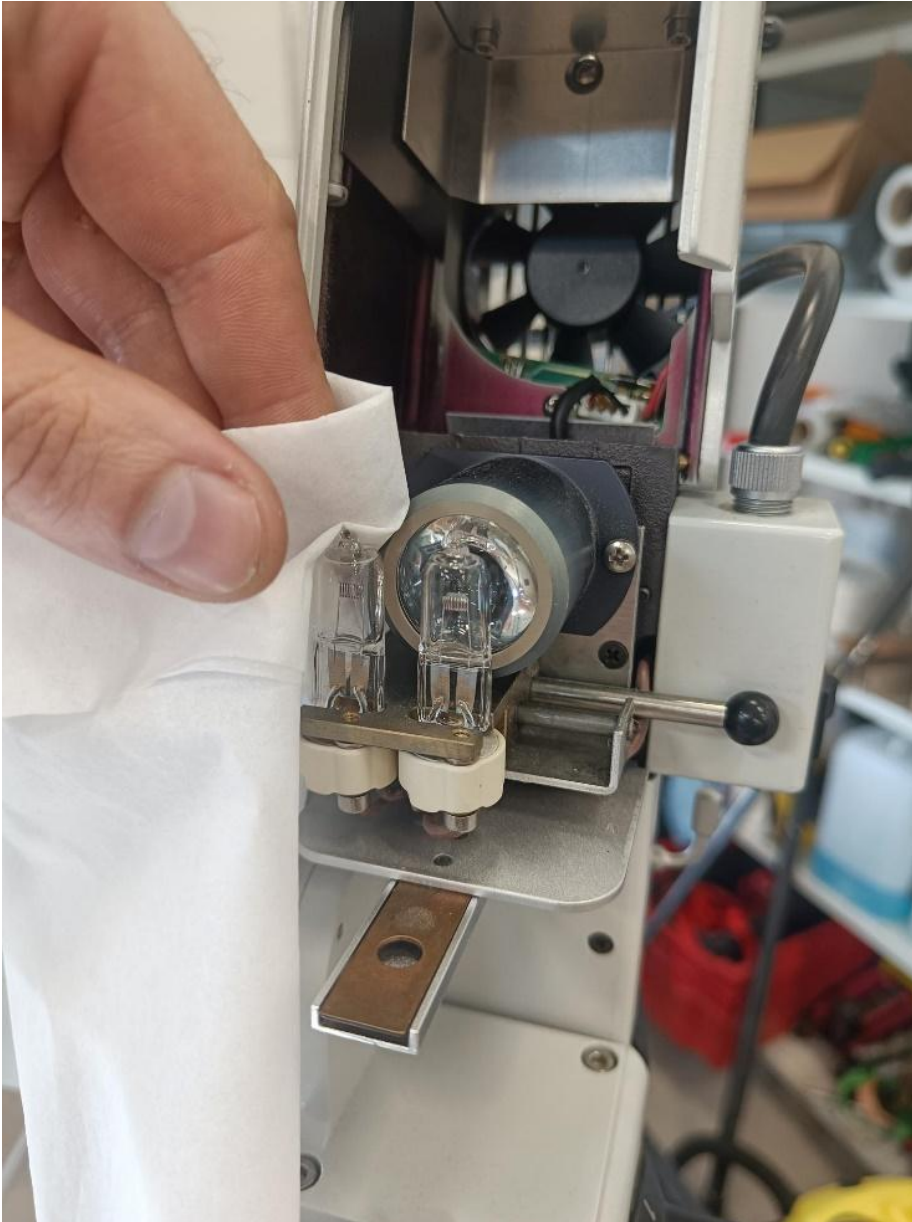

3. Sulje luukku varovasti. Napsahdus kuuluu kun yksikön suoja lukittuu.
Testaa toimivuus.

Kylmävalo polttimon vaihto:

Ota aina ennen lampunvaihtoa virtajohto pois seinästä!

Odot, että poltin on jäähtynyt ennen vaihtotyötä jos ollut hiljattain käytössä!


Yleisin poltin kylmävaloon 15V/150W GZ6.35, HLX64634


12V/100W (vanhat kylmävaloskoopit: HLX64627 esim.)

1. Irroita harmaa kylmävalokaapeli vetämällä ja avaa ympyröidyt sormiruuvit.




2. Nosta valokelkka varovasti. Irroita molemmat valokannakkeet halogeenivaloista varovasti vetämällä.

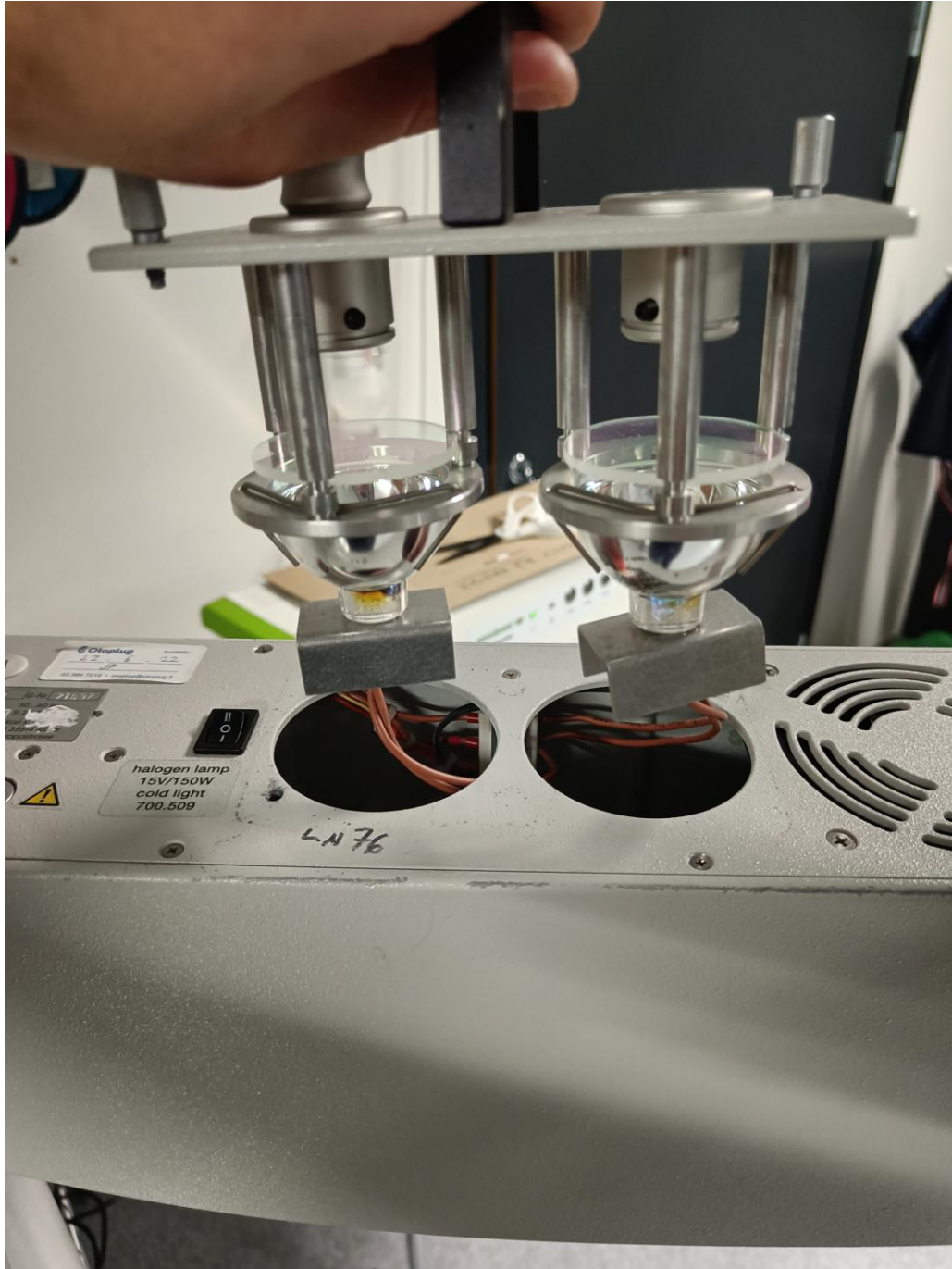

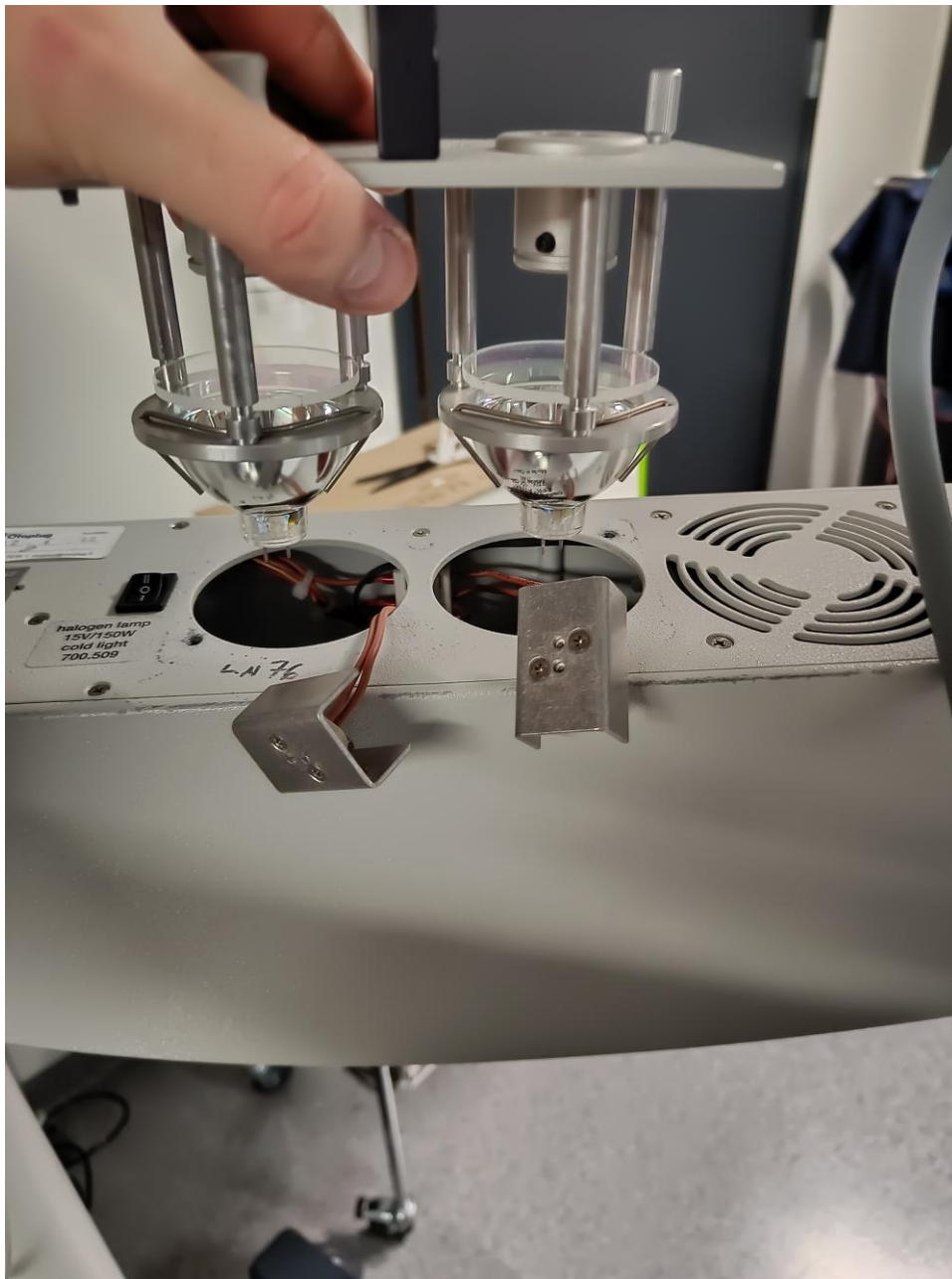

3. Liu'uta halogeenipoltinta suuntaan jossa ei ole edessä ruuvinkantoja.
vaihda poltin ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Testaa toiminta.

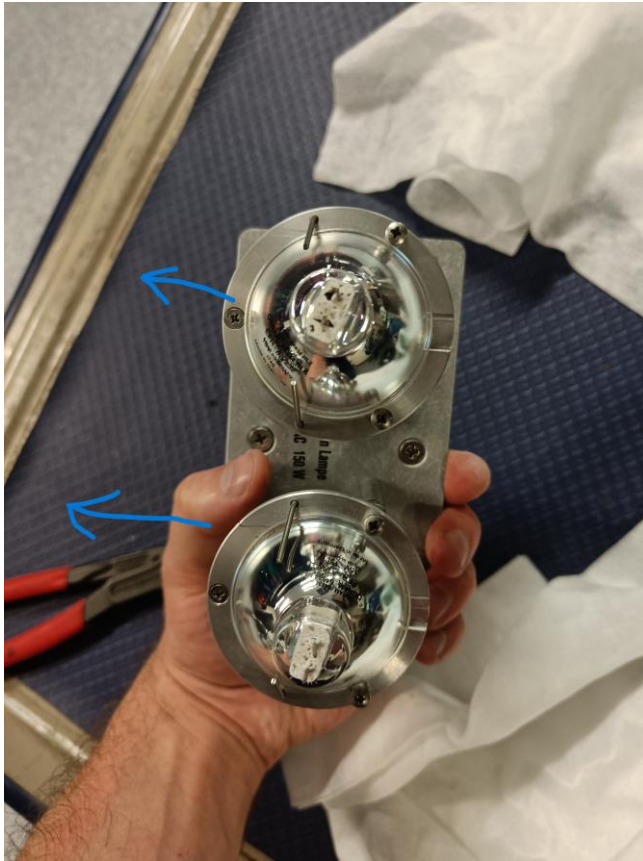

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Otoplugin asiakaspalveluun.

Yhteistyöterveisin
Otoplug Oy
Jesse Pulkkinen
Tekninen asiantuntija